

Opalescence

Tooth Whitening

- 健康上の懸念(疾患等)がある場合は、ホワイトニング治療前にかかりつけ専門医に相談をしてください。
- 妊娠中または授乳期の方は本品を使用しないでください。
- 歯面の状態により他の箇所比べて早くホワイトニング効果が進むことがあります。そのため、白さに差が表れて色むら(白い斑点)が見られる場合がありますが、使用を繰り返すことで色むらは抑えられます。
- ホワイトニング後、時間の経過と共に色戻りしますので、必要に応じてホワイトニングのタッチアップのために歯科医院を受診してください。
- ジェルが目に入らないように注意してください。もし、目に入った場合は、速やかに目を水で洗った後、専門医に相談してください。
- 希望とする歯の色調について歯科医師と相談してください。
- ホワイトニング後も定期的に歯科医院を受診し歯の色調メンテナンス、口腔内クリーニングを行いましょ。

Opalescence


Tooth Whitening

オパールエッセンスGo
ホームホワイトニングシステム

ご使用前に必ずお読みください



患者様用取扱説明書



[選任製造販売業者] ULTRADENT JAPAN株式会社 電話番号 0120-060-751

[製造業者] ULTRADENT PRODUCTS, INC. 米国

Manufactured by Ultradent Products, Inc. 505 West Ultradent Drive,
South Jordan, Utah 84095 www.opalescence.com Made in USA from
U.S. and globally sourced materials


ULTRADENT

1009656AR01 073121

Instruction Opalescence GO 6%
Mint Patient Kit Japan

使用方法



1.パッケージから製品を取り出します。
「U」...上顎用ホワイトニングトレイ
「L」...下顎用ホワイトニングトレイ



2.上顎用トレイを歯面に装着します。



3.軽く吸い込むようにして、トレイを歯面に密着させます。



4.内側の白いトレイを歯に残したまま、外側の色付きトレイ(緑)を取り外します。下顎用トレイも同様に装着します。装着時間は歯科医師の指導に従ってください。



5.ホワイトニング終了後、トレイを取り外して破棄します。歯を磨き完全にジェルを除去します。



使い方を動画でチェック!

▶ 製品の使用方法はこちらの動画で!

トレイ装着時間 : 1日最大90分

使用上の注意

本製品を使用する前に必ず歯科医師による
口腔内の診断が必要です。

1. ジェルが歯肉に触れないように装着してください。
2. ホワイトニングにより、アマルガム(銀の詰め物)に面したトレイの一部に紫色の着色が見られる場合がありますが、問題ありません。
3. トレイを飲み込んだり吸引したりしないでください。
4. 製品の使用に関して質問がある場合は、歯科医師に相談してください。
5. 本品使用中、歯肉、唇、喉、舌などの口腔内に不快感が生じる場合があります。その際は、製品の使用を中止してください。使用中止後も症状が続いたり悪化する場合は、直ちに歯科医師へ連絡してください。
6. ホワイトニング中は喫煙やコーヒー、カレー等の着色物の飲食はなるべく控えてください。
7. 睡眠中はトレイを着用しないでください。
8. 使用中にジェルを飲み込まないように注意してください。
9. アレルギーをお持ちの場合、歯科医師に相談し、必要に応じて専門医に受診してください。また、使用後にアレルギーが発生した場合は、使用を中止し専門医等にご相談ください。
10. 修復物(かぶせ物、詰め物)は白くなりません。
11. ホワイトニング治療後は、歯の色が安定するのに2週間ほど要するので、審美修復や接着修復は本品治療の2週間後から行うようにします。